

AIDE AU PRELEVEMENT
SALIVAIRE SUR PAPIER FTA



I-Bien frotter l'intérieur de la joue pendant 30 secondes avec un mouvement circulaire, faire de même avec l'autre côté de l'éponge à l'intérieur de l'autre joue pendant 30 secondes.



II-Déposer un côté de l'éponge au centre du cercle rose, en appuyant bien pour que le buvard s'imbebe le plus possible, recommencer la même opération sur le même cercle avec l'autre côté de l'éponge.



III-La zone de dépôt passe du rose au blanc.



IV-Identifier le papier FTA avec l'étiquette du patient (nom, prénom, date de naissance)



V-Indiquer l'heure de prélèvement et laisser sécher 1 heure à température ambiante à minima sans forcer le séchage.

Mettre le buvard dans une enveloppe identifiée avec l'étiquette du patient (nom, prénom, date de naissance). Ne pas fermer l'enveloppe.